



ifixsys

一次性固定器组件



制造商：广州天泓医疗科技有限公司
网址：www.ifixsys.com
电话：020-38080269
传真：020-38080299





产品特性和优势

- 德国 ISYS 研发的外科手术体位安置新材料，国际专利号：WO2016/00825A1
- 运用前沿的纳米技术及新型高分子材料为原料
- 可满足各类外科手术体位固定要求
- 可大幅缩短手术体位安置时间，提高手术室周转率，有效减轻医护作业强度，提高工作效率
- 新型固定材料柔软透气，可主动贴合身体轮廓，可有效避免术后对身体造成的压迫伤和皮肤损伤，全面提升手术护理质量

产品介绍



网纹易撕胶带

- 德国先进技术，具有世界发明专利
- 纳米级别的特殊锚扣
- 配合专用固定带可产生强大的水平向摩擦力
- 可重复使用

高分子固定带


- 德国先进技术，具有世界发明专利
- 采用环保高分子聚酯类材料制成
- 高分子材料柔软、舒适，透气、透水，且具有强大的抗撕裂性和拉伸性
- 高分子固定带具有一定的弹性和延伸性，可主动贴合身体轮廓，增加皮肤接触面积，有效减轻体表压迫伤和长时间约束对神经造成的损伤
- 一次性使用避免交叉感染




外科手术固定装置

- 配合手术床使用固德易固定带而专门研发的专用固定装置
- 具有国内专利
- 能快速挂载在手术床两边手扶杆上，同时也可轻松取下
- 多种规格，能满足不同型号手术床的需求，并以不同颜色作为区分
- 模块化设计，可自由选择锚点位置和安装长度
- 可重复使用


操作步骤

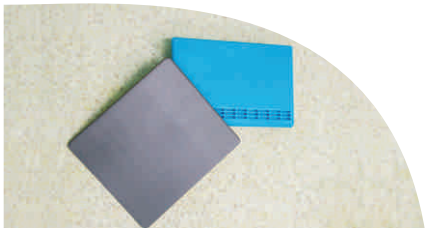

取用“网纹易撕胶带”对齐贴于“外科手术固定装置”上并按压抚平

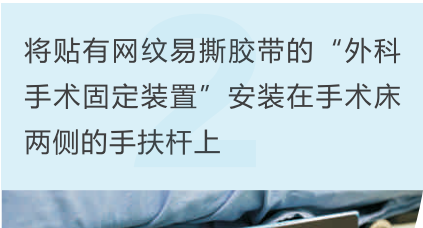

将贴有网纹易撕胶带的“外科手术固定装置”安装在手术床两侧的手扶杆上

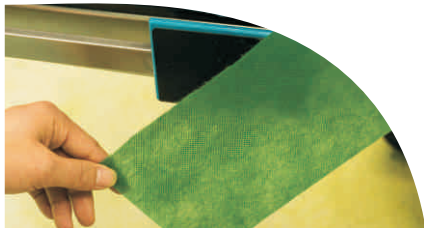

取用相应尺寸的“高分子固定绷带”贴于外科手术固定装置上并抚平

固定效果



◀ 颈椎后路手术体位

- 创新的 X 形交叉固定法，避免了肩托对病人造成的压迫伤
- 可同时对病人肩部、手臂、身体进行快速、有效的固定



侧卧位颅脑手术 ▶

- 采用新材料对病人进行侧卧位固定及单肩位拉肩固定
- 可稳定地保持侧卧位手术体位，同时确保肩部不下垂



常用规格型号

产品名称	型号	规格	说明
高分子固定绷带	12型	12cm x 250cm	适用于肩部固定
	20A 型	20cm x 150cm	适用于四肢固定
	35A 型	35cm x 180cm	适用于躯体固定
网纹易撕胶带	12型	12cm x 12.5cm	用于粘贴高分子固定绷带
外科手术固定装置	12A 型	12.5cm x 8cm 蓝色	用于手术床两侧提供锚点
	12B 型	12.5cm x 8cm 白色	
	12C 型	12.5cm x 8cm 绿色	

注：以上如有特殊规格的需求，可按需定制。

性能参数表

高分子固定绷带最大抗断裂强度	80kg
高分子固定绷带抗穿破强度	15kg
高分子固定绷带与网纹易撕胶带最大水平贴合力	120kg

- ① 重复使用网纹易撕胶带需定期使用专用清洁工具做维护
- ② 发现摩擦力严重下降的情况应立即更换新的网纹易撕胶带